

Présentation des produits

Soins des plaies

Date : Juillet 2026



Notre proposition de valeur dans le domaine du traitement des plaies.

Les patients atteints de plaies aiguës sont souvent bouleversés et souffrent de douleurs, d’infections ou d’une mobilité réduite dans leur vie quotidienne. C’est pourquoi, il est très important que la cicatrisation progresse rapidement et que chaque jour apporte une meilleure qualité de vie.

Les professionnels de la santé sont tous les jours confrontés à des conditions difficiles et à la pression du temps, afin que le bien-être et les besoins des patients aient toujours la priorité. Ils oeuvrent avec beaucoup d’engagement et une solide expérience pour assurer les meilleurs soins à leurs patients.

Des produits de haute qualité et des conseils professionnels améliorent et facilitent la vie quotidienne des utilisateurs et des professionnels de la santé. Le but de Coloplast est de contribuer chaque jour à diminuer le temps de guérison des personnes concernées.

Moins de jours avec des plaies – a pour chacun une signification particulière, néanmoins toutes les personnes impliquées poursuivent le même objectif : les meilleurs soins possibles pour le patient !

Chacun contribue, au quotidien, à la progression de la cicatrisation des plaies avec une solide expérience et des soins modernes des plaies.

Moins de jours avec des plaies




Table des matières

4	Le triangle d'évaluation des plaies	34	Alginate/Alginate avec argent
5	La montagne de la plaie Coloplast		Biatain® Alginate
			Biatain® Alginate Ag
6	Pansement Mousse	38	Interface en silicone
	La technologie 3DFit®		Biatain® Contact
	Biatain®		
	Biatain® Silicone	40	Prise en charge des plis cutanés
	Biatain® Silicone Non-Border		InterDry®
	Biatain® Silicone Lite		
18	Pansements en mousse avec ions argent	42	Solution de rinçage/Soins de la peau
	Biatain® Ag		Allrinse®
	Biatain® Silicone Ag		Purilon®
22	Pansement mousse avec ibuprofène	46	Informations sur la commande
	Biatain® Ibu	54	Coloplast® Professional
24	Hydrocolloïde	55	Thérapie locale des plaies
	Comfeel® Plus Flexibel		
	Comfeel® Plus Transparent		
28	Super absorbant		
	Biatain® Superabsorber		
	Biatain® Super		
32	Pansement en fibre		
	Biatain® Fiber		

Le triangle d'évaluation des plaies Coloplast – un concept intuitif pour l'évaluation facile de la plaie.

Coloplast a demandé à de nombreux professionnels de par le monde, quels sont, outre les aspects de l'origine des plaies et des besoins des patients, les facteurs les plus importants dans l'évaluation locale de la plaie.

La réponse était claire : le lit, les bords et le pourtour de la plaie. En effet, ces trois points contribuent de manière décisive à la cicatrisation.

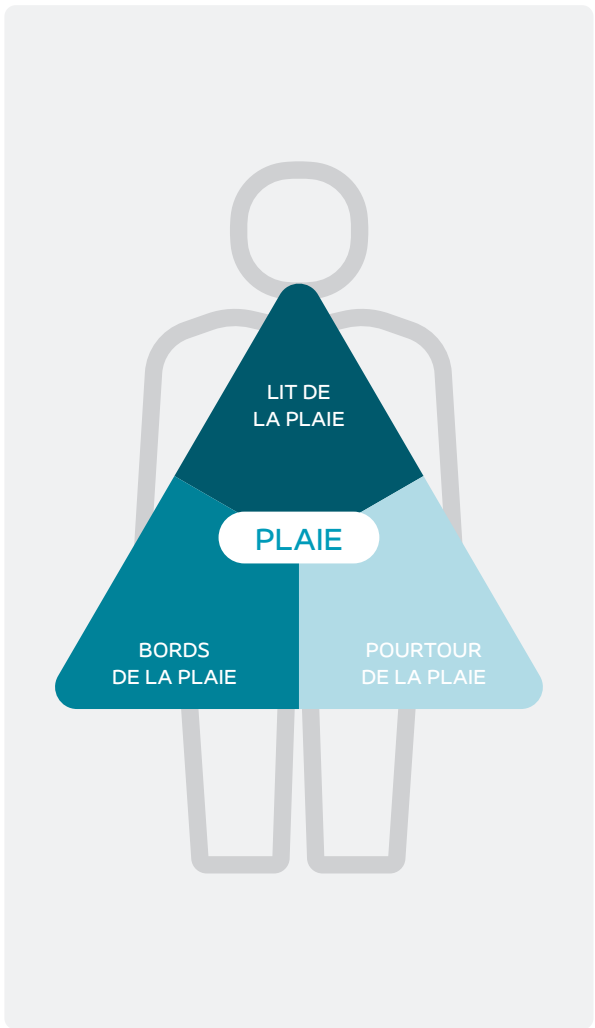

Le lit de la plaie

En ce qui concerne le lit de la plaie, les buts significatifs d'un point de vue clinique sont l'absence d'infection, un milieu humide optimal et la formation de tissu de granulation. La montagne de la plaie montre les options de traitement adéquates à chaque phase de la plaie.


Les bords de la plaie

Les bords de la plaie devraient être protégés contre les facteurs perturbateurs tels que la macération et la nécrose. Les pansements en mousse Biatain® protègent les bords de la plaie grâce à une excellente absorption verticale et à sa conformabilité au lit de la plaie.

Le pourtour de la plaie

Le but est d'avoir une peau périlésionnelle saine, exempte de macération et d'irritation. Même la peau sèche et l'hyperkératose devraient être reconnues et traitées. Le choix d'un pansement avec une adhésion adéquate est un facteur important pour la protection de la peau périlésionnelle. C'est pourquoi les pansements mousses Biatain® offrent différents types d'adhésion pour tous les types de peau.


La montagne de la plaie Coloplast

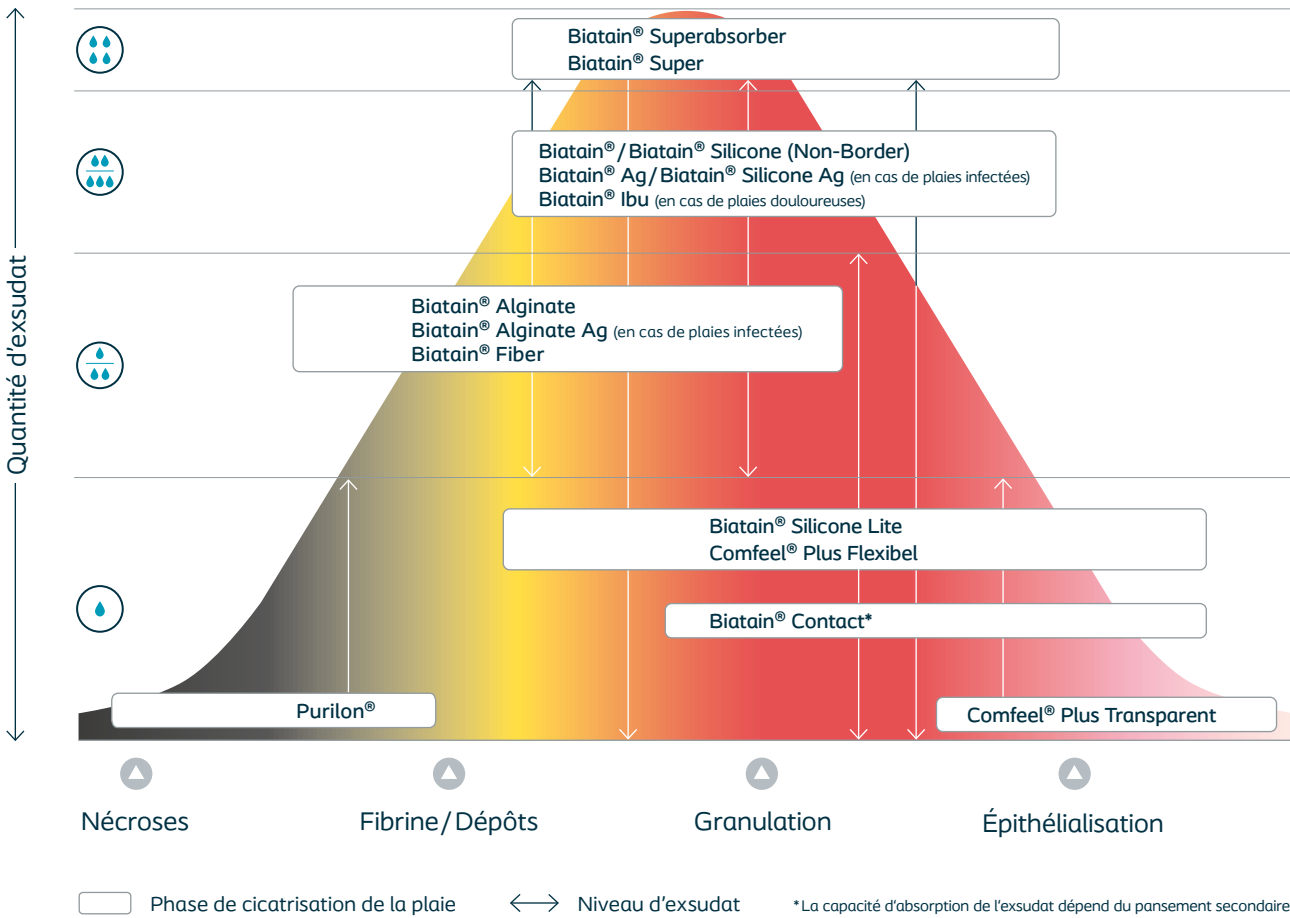

Selon les points indiqués dans le triangle d'évaluation des plaies, l'évaluation du lit de la plaie ainsi que les traitements appropriés sont des éléments indispensables pour la gestion locale de la plaie.

Dans le choix du pansement, il est nécessaire de prendre en considération aussi bien la quantité d'exsudat de la plaie que la phase de la cicatrisation. En outre, en cas de charge bactérienne élevée et en présence de douleurs liées à la plaie, des mesures topiques et/ou systémiques appropriées doivent être appliquées. La montagne de la plaie Coloplast offre des informations sur les domaines d'utilisation de chaque pansement.

Quantité d'exsudat	Caractéristiques
Léger	Effet antibactérien
Léger – moyen	Découpable
Léger – abondant	Non découpable
Moyen – abondant	Résistant à l'eau
Très abondant	Fixation nécessaire
	Pansement secondaire

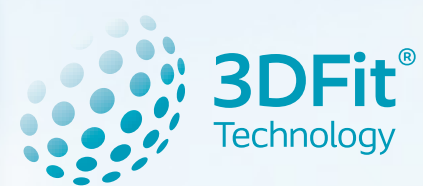


Pansement Mousse Biatain®

L'unique pansement mousse doté de la technologie 3DFit

Sa conformabilité fait la différence.

Grâce à la technologie 3DFit, les pansements Biatain® se conforment au lit de la plaie, créent un contact direct et comblent l'espace mort empêchant l'accumulation des exsudats et assurent ainsi un milieu de cicatrisation optimal.

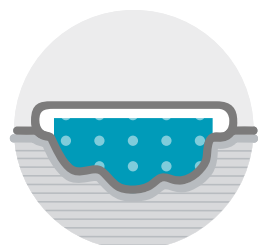

Se conforme au lit de la plaie



Absorption verticale



Rétention des exsudats



Pansement mousse Biatain® Silicone

- › tenue fiable
- › retrait indolore
- › application simple et aseptique grâce à la technologie non-touch en trois pièces



Pansement mousse Biatain® Silicone Non-Border

- › Idéal pour les plaies avec la peau périlésionnelle fragile et/ou abîmée
- › Doux et atraumatique pour la peau
- › Sert de « troisième » main lors des changements de pansement



Pansement mousse Biatain® Adhésif

- › bordure adhésive à base d'hydrocolloïde
- › liberté de mouvement grâce au maintien sûr
- › peu d'enroulement grâce aux bordure d'hydrocolloïde



Pansement mousse Biatain® Non Adhésif

- › convient tout particulièrement lorsque la peau périlésionnelle est déjà très endommagée et pour les patients présentant un risque d'irritations cutanées
- › les bords biseautés réduisent en outre l'apparition de points de pression, notamment en association à une thérapie compressive

Types d'adhésion Biatain®

				
Type de peau	Adhésif (Silicone)	Adhésion douce (Silicone)	Adhésif (Hydrocolloïde)	Non Adhésif
Peau normale	✓	✓	✓	✓
Peau légèrement abîmée	✓	✓	✓	✓
Peau très abîmée	✓	✓		✓
Peau fragile	✓	✓		✓



Caractéristiques



Courte description

Le pansement mousse Biatain® offre une excellente prise en charge de l'exsudat, en raison de la structure capillaire en polymère 3D. Le pansement se conforme au lit de la plaie, empêchant ainsi que l'exsudat ne s'accumule sur la plaie.

L'absorption verticale associée à la conformabilité et à la capacité de rétention, protège contre la macération et les fuites. Le film externe en polyuréthane semi-perméable protège des germes et de l'humidité.



Ulcère de jambe après le premier changement de pansement. L'exsudat a été absorbé par le pansement.



Application de Biatain® non adhésif 10 × 10 cm.



Après quelques jours de traitement avec Biatain®, on observe une réduction de la taille de la plaie et la formation de tissu de granulation.

Avantages du produit

- › Excellente absorption et rétention même sous compression
- › Crée le milieu humide idéal pour la plaie
- › Biatain® se conforme au lit de la plaie et s'adapte à ses contours. Il protège ainsi les bords de la plaie et évite l'accumulation d'exsudat sur la plaie
- › Les mousses Biatain® absorbent verticalement, ce qui minimise le risque de macération et de fuites
- › La surface, lissée par un procédé thermique, empêche toute adhérence avec la plaie et permet un renouvellement atraumatique du pansement
- › Les mousses Biatain® sont particulièrement douces et souples pour un confort de port optimal
- › Longue durée de port pouvant aller jusqu'à 7 jours

*Seulement pour Biatain® Adhésif et Biatain® Sacrum/Talon **Seulement pour Biatain® Non Adhésif

Biatain®

Excellente absorption pour une cicatrisation optimale

Indication


Le pansement mousse Biatain® est destiné au soin des plaies chroniques et aiguës légèrement à fortement exsudatives comme par exemple :

- › Ulcères de jambe
- › Escarres
- › Ulcères du pied diabétique non infectés
- › Sites donneurs de greffe
- › Plaies post-opératoires
- › Dermabrasions
- › Brûlures du 2ème degré

Le pansement mousse Biatain® Non Adhésif est adapté à tous les types de peau. Le pansement Biatain® adhésif convient tout particulièrement pour une peau périlésionnelle intacte.

Avantages

- › Absorption et rétention excellentes
- › Fiable même sous compression
- › Se conforme au lit de la plaie

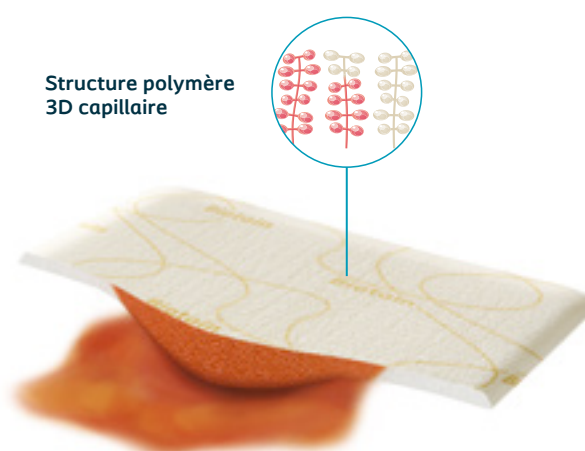



Caractéristiques



Courte description

Le pansement mousse Biatain® Silicone combine la mousse Biatain® qui a fait ses preuves avec un dépôt supplémentaire super absorbant et une adhésion douce en silicone.

L'adhésion en silicone douce et perforée couvre toute la surface du pansement et offre donc une tenue fiable, sans adhérer à la plaie. La structure perforée permet une excellente absorption.

Le film externe semi-perméable protège la plaie contre l'eau et les bactéries externes et résiste sous la douche. Le pansement est doté d'un feuillet applicateur en 3 parties, pour une application simple et aseptique.



La technologie non-touch en 3 parties permet une application facile et aseptique tout en empêchant l'adhésion aux gants.

Biatain® Silicone

Pour une adhésion délicate en cas de plaies exsudatives

Indication

Biatain® Silicone est une solution polyvalente pour le traitement d'une large gamme de plaies chroniques et aiguës moyennement à fortement exsudatives comme par exemple :

- › Ulcères de jambe
- › Escarres
- › Ulcères du pied diabétique non infectés
- › Sites donneurs de greffe
- › Plaies post-opératoires
- › Dermabrasions

Biatain® Silicone convient pour tous les types de peau, même pour la peau âgée et fragile.

Avantages

- › La structure unique en polymère 3D se conforme au lit de la plaie
- › Réduit le risque de macération et de fuites
- › Adhésion sûre et changement de pansement atraumatique


Film supérieur
résistant aux bactéries et à l'eau

Dépôt
avec super absorbants

Mousse Biatain®

Adhésion en silicone
douce et sûre

Technologie non-touch

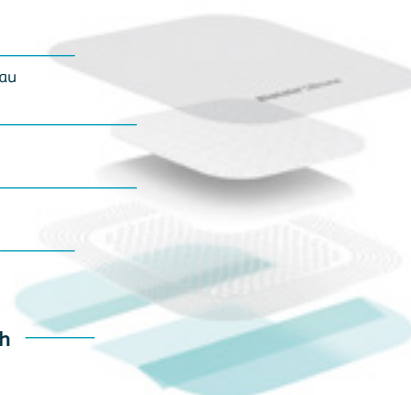

Avantages du produit

- › Excellente absorption et rétention même sous compression
- › Absorption verticale de l'exsudat et il se conforme au lit de la plaie, ce qui minimise le risque de macération et de fuites
- › Contact optimal avec le lit de la plaie, minimisant le risque que l'exsudat s'accumule sur la plaie et permettant une économie sur les coûts du matériel de remplissage de la plaie
- › Adhésion douce en silicone, offrant une tenue fiable sans adhérer à la plaie et permettant un retrait atraumatique du pansement
- › Le feuillet applicateur évite toute adhésion aux gants
- › Longue durée de port pouvant aller jusqu'à 7 jours



La grande flexibilité procure une très bonne ergonomie et un confort de port optimal, également pour les parties du corps difficiles à panser.



Biatain® Silicone se conforme au lit de la plaie et s'adapte parfaitement à ses contours.



Caractéristiques



Courte description

Pansement mousse Biatain® Silicone Non-Border l'unique doté de la technologie 3DFit offre une adhérence douce sans bord adhésif.

L'adhésif siliconé doux et perforé couvre toute la face interne du pansement et offre donc une adhérence sans coller à la plaie. La structure perforée permet une excellente absorption. Le film externe semi-perméable protège la plaie de l'extérieur, il est imperméable à l'eau et aux bactéries.

Le pansement est doté d'un feuillet applicateur en 3 parties, pour une application simple et aseptique.



La technologie non-touch en 3 parties permet une application facile et aseptique tout en empêchant de coller aux gants.



Biatain® Silicone Non-Border peut être découpé à la taille de la plaie, donc parfaitement adapté pour les parties difficiles à panser (par exemple, les doigts, les orteils, etc.).



Le pansement mousse offre une excellente capacité d'absorption et de rétention des exsudats même sous compression.

Biatain® Silicone Non-Border

Une adhérence en douceur pour les plaies exsudatives

Indication

Biatain® Silicone est un pansement polyvalent pour le traitement d'une large gamme de plaies chroniques et aiguës légèrement à fortement exsudatives comme par exemple :

- › Ulcères de jambe
- › Escarres
- › Ulcères du pied diabétique non infectés

Biatain® Silicone convient pour tous les types de peau, même pour la peau âgée et fragile.

Avantages

- › Se conforme au lit de la plaie comblant l'espace mort en réduisant ainsi l'accumulation d'exsudat
- › Idéal même sous un traitement par compression
- › Se découpe donc s'adapte facilement à la plaie et aux endroits difficile à panser.
- › L'adhésif doux sert de « troisième » main pour le changement de pansement

Mousse Biatain®
avec technologie 3DFit

Adhésion au silicone
pleine surface, douce



Avantages du produit

- › Idéal en combinaison avec une thérapie de compression car l'absorption verticale est maintenue et les exsudats sont retenus en toute sécurité
- › Protège les berges de la plaie, minimise le risque de macération et de fuites
- › Crée un milieu humide favorable pour la cicatrisation des plaies
- › Doux et souple donc idéal pour l'application dans les plis de la peau
- › L'adhésif siliconé doux recouvrant la face interne du pansement sert de « troisième main » lors du changement de pansement et facilite ainsi l'application
- › Longue durée de port pouvant aller jusqu'à 7 jours et économique car nécessite moins de matériel de remplissage de la plaie



Caractéristiques



Courte description

Biatain® Silicone Lite est un pansement mousse particulièrement flexible, mince et adaptable.

L'adhésion en silicone douce et perforée couvrant toute la surface du pansement, offre une tenue fiable, sans adhérer à la plaie. La structure perforée permet une excellente absorption.

Le film externe protège la plaie de l'extérieur et permet la douche. Le pansement est doté d'un feuillet applicateur en 3 parties, pour une application simple et aseptique.



La grande flexibilité du pansement permet de bien soigner les parties du corps difficiles à panser.

Biatain® Silicone Lite

Pour une adhésion douce en cas de plaies légèrement exsudatives

Indication

Biatain® Silicone Lite est un pansement mousse mince et particulièrement flexible pour les plaies chroniques et aiguës légèrement à moyennement exsudatives, comme par exemple :

- › Ulcères de jambe
- › Escarres
- › Ulcères du pied diabétique non infectés
- › Sites donneurs de greffe
- › Plaies post-opératoires
- › Dermabrasions

Biatain® Silicone Lite convient à tous les types de peau, même pour la peau âgée et fragile.

Avantages


- › Excellente absorption pour les plaies légèrement à moyennement exsudatives
- › Plus mince – donc, plus flexible
- › Idéal pour les plaies légèrement exsudatives

Film supérieur ————
résistant aux bactéries et à l'eau

Mousse Biatain® ————

Adhésion en silicone ————
douce et sûre

Technologie non-touch ————

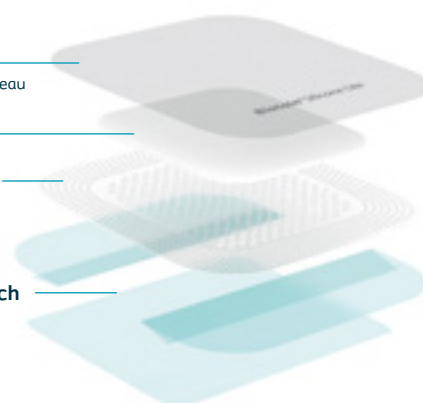


Avantages du produit

- › Excellente absorption et rétention même sous compression
- › Le pansement se conforme au lit de la plaie et s'adapte à ses contours. Il minimise ainsi le risque de macération et de fuite
- › L'adhésion douce en silicone offre une tenue fiable sans adhérer à la plaie et permet un retrait atraumatique du pansement
- › Grâce au film externe semi-perméable, qui protège la plaie contre l'eau et les bactéries de l'extérieur, le patient peut prendre une douche
- › La technologie non-touch en 3 parties facilite une application simple et aseptique
- › Longue durée de port pouvant aller jusqu'à 7 jours



Biatain® Silicone Lite convient également pour les plaies aiguës.

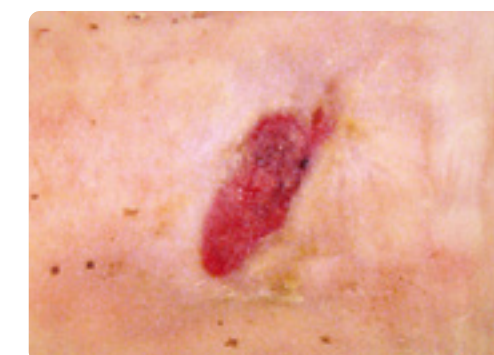

Excellente absorption pour les plaies légèrement exsudatives.

La gamme élargie de Biatain® Silicone – formes et tailles innovantes

Développées par les experts – formées pour les patients.

Biatain® Silicone convient aussi bien pour les plaies chroniques que pour les plaies aiguës.

Biatain® Silicone Multiforme

Par ex. approprié pour :

- › Ulcères de jambe situés sur la malléole
- › Le long de la colonne vertébrale
- › Diverses articulations
- › La région anale
- › Après les opérations de la thyroïde

Biatain® Silicone

Par ex. approprié pour :

- › Ulcères de jambe
- › Interventions chirurgicales de l'abdomen, par ex. césarienne
- › Sites donneurs de greffe
- › Opérations de la hanche et de l'hernie
- › Chirurgie cardiaque et thoracique
- › Opération de la thyroïde

Biatain® Silicone

Par ex. approprié pour :

- › Ulcères de jambe
- › Escarres
- › Écorchures
- › Syndrome du pied diabétique

Biatain® Silicone convient pour tous les types de peau, même pour la peau âgée et fragile.

Biatain® Silicone Sacrum*

Par ex. approprié pour :

- › Escarres
- › Ulcères de jambe au mollet

Biatain® Silicone Talon

Par ex. approprié pour :

- › Escarres au talon et au coude
- › Syndrome du pied diabétique
- › Interventions chirurgicales au-dessous de l'aisselle

Biatain® Silicone Sacrum*

Par ex. approprié pour :

- › Escarres
- › Ulcérations en guêtre
- › Après plastie mammaire
- › Plaies traumatiques au genou

*Si nécessaire, peut être appliqué dans les deux directions

Biatain® Ag

Pour les plaies localement infectées

Indication


Biatain® Ag convient pour les plaies chroniques et aiguës légèrement à fortement exsudatives, colonisées par des bactéries, comme par exemple :

- › Ulcères de jambe
- › Escarres
- › Ulcères du pied diabétique
- › Brûlures du 1er et 2ème degré
- › Sites donneurs de greffe
- › Plaies post-opératoires
- › Dermabrasions

Biatain® Ag Non Adhésif convient à tous les types de peau et particulièrement pour les peaux très fragiles. Biatain® Ag Adhésif est conçu tout particulièrement pour une peau périlésionnelle intacte.

Avantages

- › Excellente prise en charge de l'exsudat
- › Se conforme au lit de la plaie
- › Effet antimicrobien, également contre SARM, VRE, germes BLSE et pseudomonas

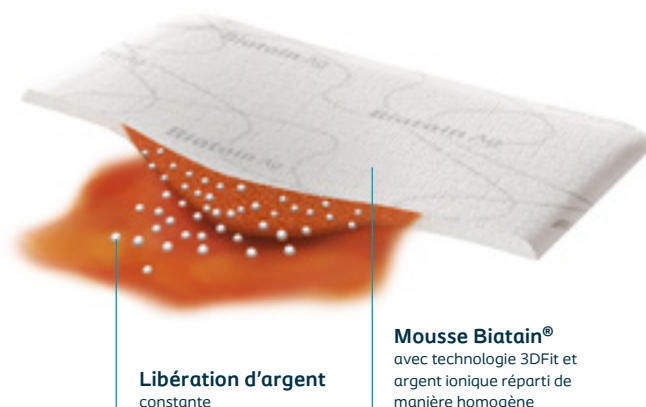

Caractéristiques




Courte description

Le pansement mousse Biatain® Ag est un pansement antimicrobien contenant 1,0 mg/cm² d'argent ionique, qui crée et maintient un milieu idéal pour la cicatrisation de la plaie.

Le pansement mousse est basé sur la structure en polymère 3D de Biatain® qui a fait ses preuves. En outre, il contient un complexe d'argent, efficace, antimicrobien et distribué de manière homogène.

Lors du contact avec l'exsudat de la plaie, les ions d'argent sont libérés de manière contrôlée en échange d'ions sodium, en fonction de la quantité d'exsudat absorbée. Ceci permet de réduire efficacement la charge bactérienne et l'infection locale.

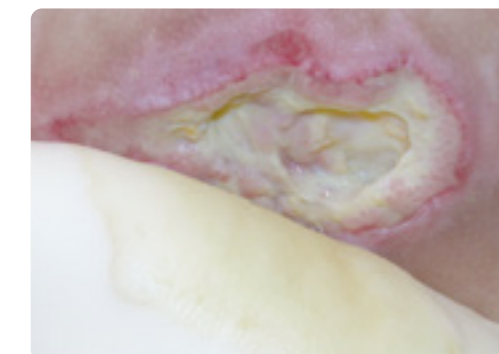

Escarre dont la cicatrisation est perturbée par la charge bactérienne.




Réduction de la contamination bactérienne – tissu de granulation.

Avantages du produit

- › Excellente absorption et rétention même sous compression
- › Le pansement se conforme au lit de la plaie et ainsi il minimise le risque de macération et de fuites
- › Cicatrisation plus rapide grâce à l'action antimicrobienne efficace
- › Libération constante d'argent pendant toute la durée de port, pouvant aller jusqu'à 7 jours
- › Économie de temps et d'argent grâce à des intervalles plus longs entre les changements de pansement
- › Efficace également contre MRSA, VRE, pseudomonas et germes à BLSE



Soin de la plaie avec Biatain® Ag.

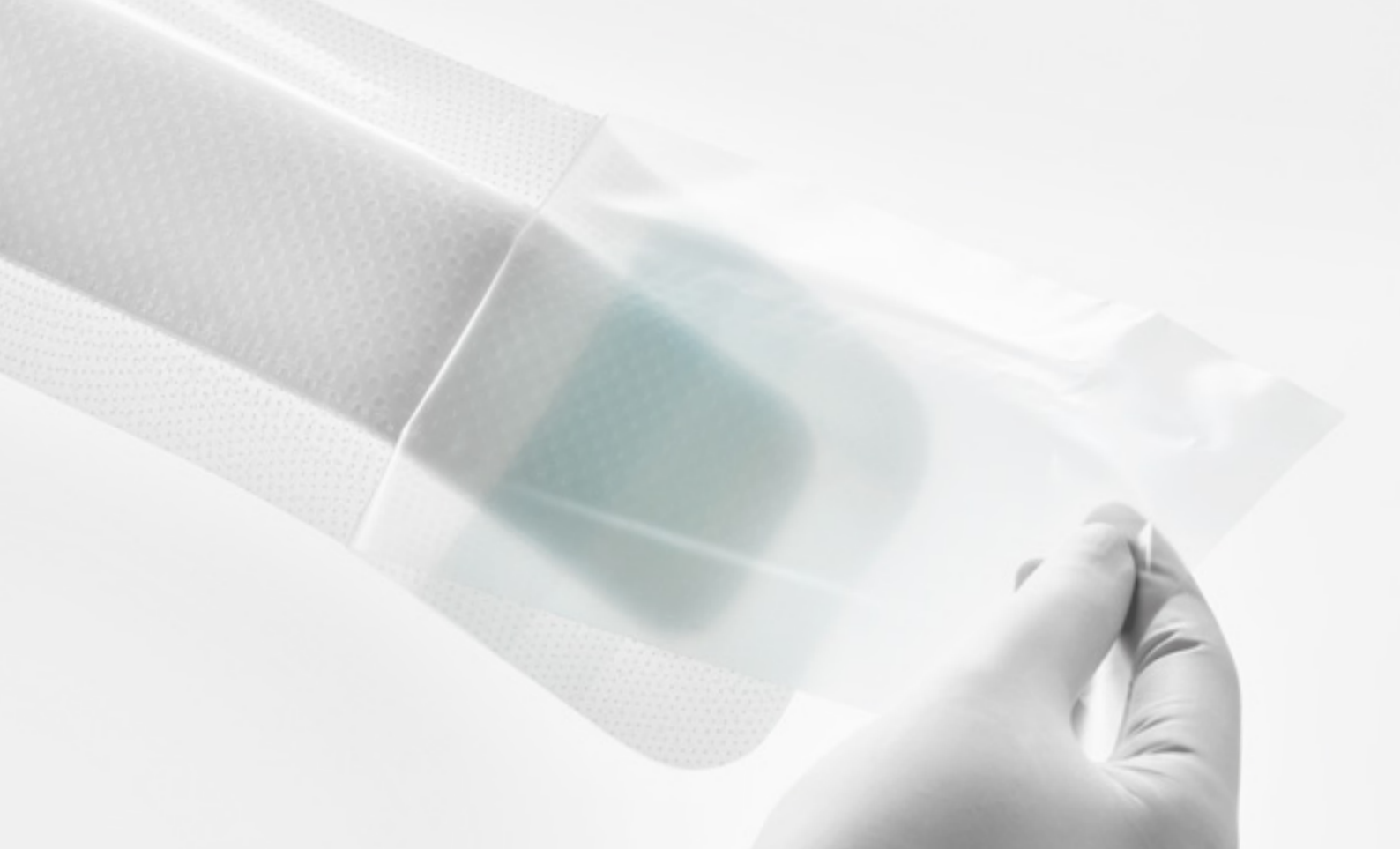

Biatain® Silicone Ag

Pour une adhésion douce en cas de plaies localement infectées

Indication

Biatain® Silicone Ag convient pour le traitement d'une large gamme de plaies chroniques et aiguës légèrement à fortement exsudatives avec retard de cicatrisation causé par des bactéries ; il convient également pour les plaies présentant un risque d'infection, comme par exemple :

- › Ulcères de jambe
- › Escarres
- › Ulcères du pied diabétique
- › Brûlures de 2ème degré
- › Sites donneurs de greffe
- › Plaies post-opératoires
- › Dermabrasions

Biatain® Silicone Ag convient pour tous les types de peau, même pour la peau âgée et fragile.

Avantages

- › Se conforme au lit de la plaie
- › Excellente absorption
- › Efficace également contre SARM, VRE, germes BLSE et pseudomonas

Adhésion en silicone
douce et sûre

Mousse 3D
avec technologie 3DFit et
argent ionique réparti de
manière homogène



Caractéristiques



Courte description

Le pansement mousse Biatain® Silicone Ag offre une excellente absorption et une tenue sûre avec une libération d'argent constante et efficace.

Le pansement libère, jusqu'à 7 jours, de manière continue et contrôlée, de l'argent ionique qui agit dans sa mousse et dans la plaie contre les bactéries communes, en cas de plaies infectées ne cicatrisant pas. Biatain® Silicone Ag est également efficace contre le MRSA, VRE, Pseudomonas et les germes à BLSE.

L'adhésion en silicone perforée couvre toute la surface du pansement, offre une tenue fiable sans adhérer à la plaie et permet une excellente absorption ainsi que la libération d'ions d'argent. Le film externe semi-perméable protège la plaie contre l'eau et les bactéries externes et permet de prendre une douche.



Technologie non-touch en 3 parties pour une application simple et aseptique.



Libération constante d'argent pendant toute la durée de port, allant jusqu'à 7 jours.

Avantages du produit

- › Excellente absorption et rétention même sous compression
- › Le pansement se conforme au lit de la plaie permettant un contact optimal avec celui-ci. Il minimise ainsi le risque de macération et de fuites et protège les bords de la plaie
- › Sa conformabilité permet une économie sur les coûts du matériel de remplissage de la plaie
- › La grande flexibilité permet une très bonne adaptabilité et un bon confort de port même sur les parties du corps difficiles à panser
- › L'adhésion douce en silicone offre une tenue fiable et permet un retrait atraumatique du pansement
- › Efficace contre les bactéries communes des plaies – dans le pansement et dans la plaie
- › Libération efficace d'argent pour une élimination rapide des bactéries



Excellente absorption et libération d'argent pour les plaies colonisées par les bactéries et les plaies localement infectées.



Biatain® Ibu

Excellente absorption pour les plaies douloureuses

Indication


Pansement mousse Biatain® Ibu pour les plaies légèrement à fortement exsudatives et douloureuses en raison de lésions tissulaires comme par exemple :

- › Ulcères de jambe
- › Escarres
- › Ulcères du pied diabétique non infectés
- › Sites donneurs de greffe (seulement Biatain® Ibu non adhésif)
- › Plaies post-opératoires
- › Dermabrasions
- › Brûlures de 2ème degré
- › Pour les plaies n'étant pas plus profondes que le derme

Biatain® Ibu Soft-Hold et Non Adhésif conviennent à tous les types de peau.

Avantages

- › Excellente absorption même sous compression
- › Action locale efficace
- › Soulagement rapide de la douleur

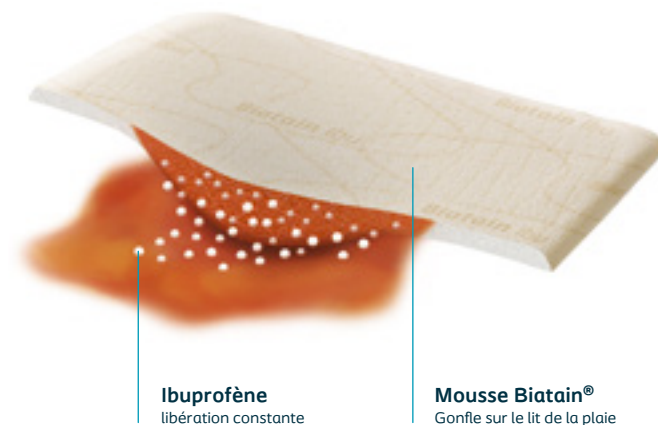

Caractéristiques



Courte description

Biatain® Ibu combine la mousse Biatain® qui a fait ses preuves avec une libération locale constante d'ibuprofène.

En raison de la structure de la mousse en polymère 3D, l'exsudat de la plaie est rapidement absorbé et retenu en toute sécurité. 0.5 mg/cm² d'ibuprofène sont répartis de manière homogène sur chaque cm² de mousse.

L'ibuprofène est libéré localement dans la plaie en fonction de la quantité d'exsudat et peut soulager les douleurs liées à la plaie, provoquées par les lésions tissulaires.



Plaie douloureuse au niveau du talon.



Après 2 semaines : diminution de la taille de la plaie, tissu de granulation sain, pas de macération.

Avantages du produit

- › Excellente absorption et rétention même sous compression
- › Crée un milieu humide optimal pour la plaie
- › Le pansement se conforme au lit de la plaie et absorbe l'exsudat verticalement. Il minimise ainsi le risque de macération et de fuites
- › Libération locale et action à l'ibuprofène sans charge systémique
- › Peut soulager les douleurs liées à la plaie, provoquées par les lésions tissulaires
- › Action rapide et de longue durée, même durant le renouvellement du pansement (jusqu'à 7 jours)
- › Améliore la qualité de vie du patient



Biatain® Ibu s'adapte aussi de manière optimale aux endroits du corps difficile à panser.

Comfeel® Plus Flexibel

Protection sûre et cicatrisation optimale


Indication

Comfeel® Plus est indiqué pour le traitement des plaies chroniques et aiguës, légèrement à moyennement exsudatives comme :

- › Ulcères de jambe
- › Escarres
- › Brûlures du 1er et 2ème degré
- › Sites donneurs de greffe
- › Plaies post-opératoires
- › Dermabrasions

Avantages

- › Particulièrement flexible
- › Bien toléré par la peau
- › Contient de la CMC et de l'alginate

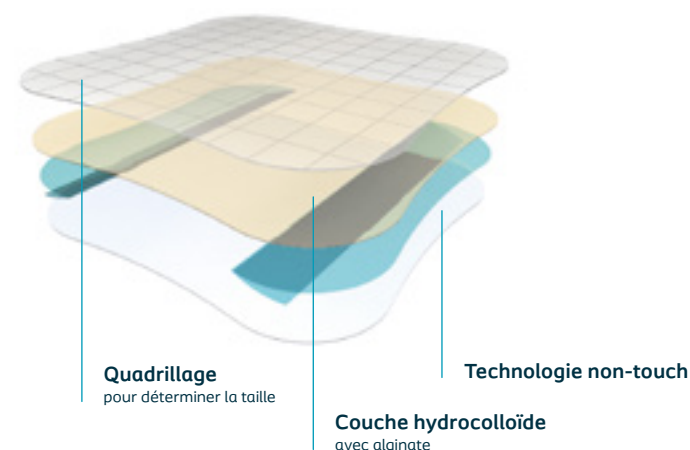


Courte description


Comfeel® Plus est un pansement hydrocolloïde particulièrement adaptable et bien toléré par la peau. Il se compose d'une matrice hydrocolloïde adhésive, dans laquelle sont enveloppés de la carboxyméthylcellulose sodium (CMC) et de l'alginate de calcium, qui lui confèrent une capacité d'absorption élevée.

Grâce au film externe en polyuréthane semi-perméable, le taux d'évaporation s'adapte à la quantité d'exsudat de la plaie et assurant sous le pansement un milieu humide optimal pour la plaie. De plus, le film semi-perméable protège la plaie contre les bactéries et les infections.

Caractéristiques

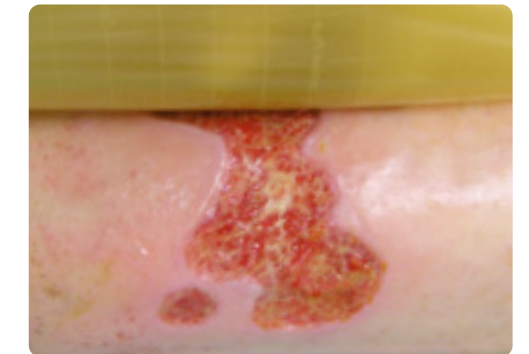

Application stérile du pansement Comfeel® Plus.

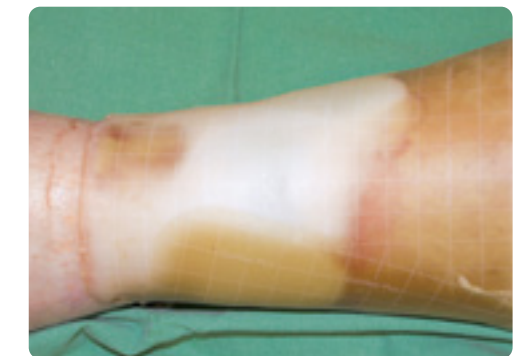


Dès que le gel se rapproche des bords du pansement, celui-ci devrait être changé.



Retrait du pansement gélifié.

Avantages du produit

- › La surface hydrophobe permet une hygiène aisée
- › Les patients mobiles qui portent le pansement peuvent prendre une douche ou un bain
- › Les bords biseautés empêchent tout enroulement du pansement
- › Détermination facile de la taille de la plaie grâce au quadrillage
- › Très flexible pour une application simple et un bon confort de port
- › L'absorption élevée crée un milieu humide optimal pour la plaie et augmente la durée de port

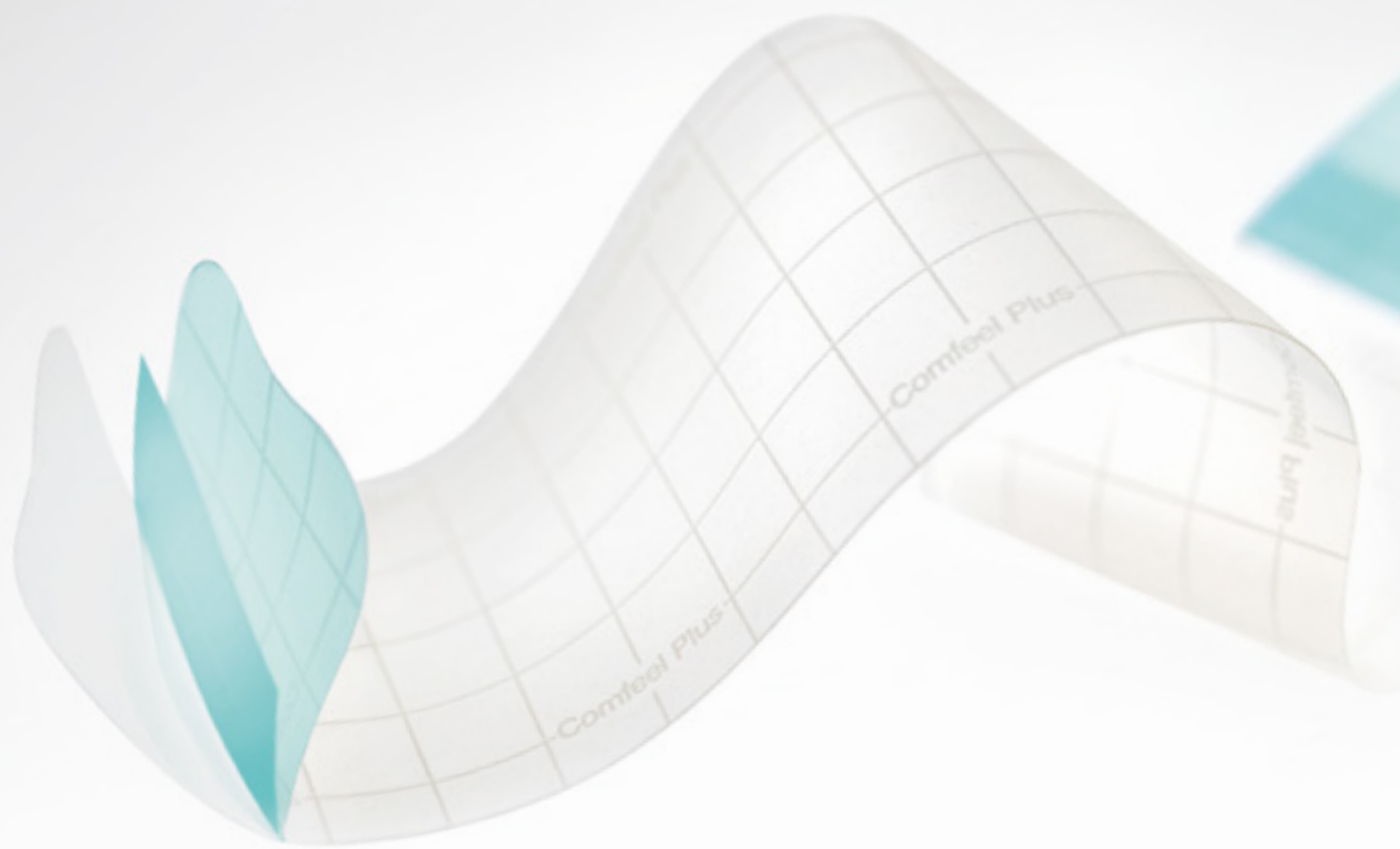

Comfeel® Plus Transparent

Protection et contrôle


Indication

Comfeel® Plus Transparent est idéal pour les plaies superficielles aiguës et les plaies en voie d'épithélialisation comme par exemple :

- › Plaies post-opératoires
- › Sites donneurs de greffe
- › Dermabrasions
- › Brûlures du 1er et 2ème degré
- › Plaies chroniques superficielles en phase d'épithélialisation

Avantages

- › Transparent
- › Bien toléré par la peau
- › Confort élevé

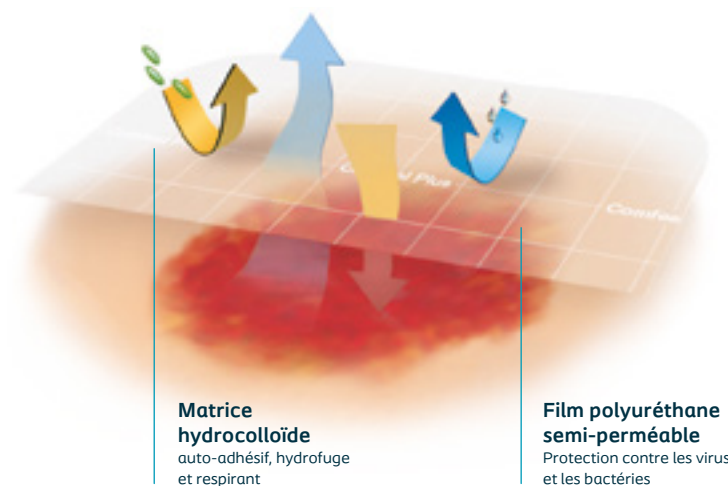

Courte description

Comfeel® Plus Transparent est un pansement hydrocolloïde particulièrement mince et transparent.


Il se compose d'une matrice hydrocolloïde adhésive et stable, dans laquelle est enveloppée de la carboxyméthylcellulose (CMC) qui se transforme en un gel cohésif, au contact de l'exsudat de la plaie. Ce gel protège la plaie et évite son adhésion à l'épithélium néoformé.

Le film polyuréthane semi-perméable garantit en permanence un milieu humide optimal pour la cicatrisation et protège la plaie contre les bactéries et l'humidité.

Caractéristiques



Flexible et mince pour le soin des parties du corps difficiles à traiter.

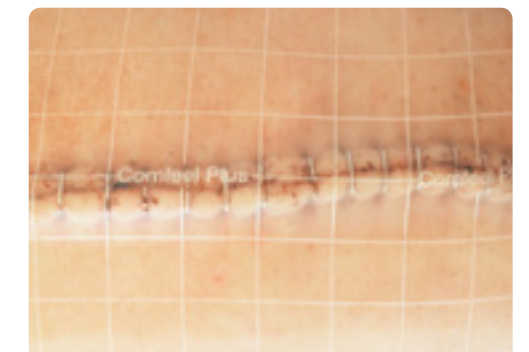

Le quadrillage et la transparence permettent une évaluation simple et rapide de la taille de la plaie.



Comfeel® Plus Transparent n'adhère pas au matériel de suture.

Avantages du produit

- › La transparence permet l'inspection de la plaie sans devoir changer de pansement
- › Evaluation facile de la taille de la plaie grâce au quadrillage
- › La surface lisse réduit le frottement et le cisaillement
- › S'adapte comme une seconde peau et réduit ainsi le risque de phlyctènes
- › La surface hydrophobe permet une hygiène aisée et le pansement est résistant sous la douche
- › Flexible et mince pour un confort de port élevé et une application simple, même sur les parties du corps difficiles à panser

Biatain® Superabsorber

Grande capacité d'absorption pour les plaies très exsudatives

Indication

Biatain® Superabsorber est indiqué pour un large éventail de plaies chroniques et aiguës modérément à très exsudatives chez les patients de plus de 3,5 kg, comme par exemple

- › Ulcère de jambe
- › Ulcères de décubitus
- › Syndrome du pied diabétique
- › Prélèvement de peau fendue
- › Plaies post-opératoires
- › Abrasions cutanées

Biatain® Superabsorber convient à tous les types de peau, y compris les peaux fragiles et délicates dues à l'âge.

Avantages

- › Peut absorber plus de 15 fois son propre poids
- › Absorbe 97% des bactéries et germes ainsi que les Métalloprotéinase matricielle³
- › Très bonne capacité de rétention
- › Utilisable sous compression

Topfilm
respirant et hydrofuge

Couche absorbante
lie les bactéries et les protéases

Couche de tissu

Couche de transfert

Couche de contact avec la plaie
doux pour la peau

Courte description

Biatain® Superabsorber est un pansement souple et non adhérent qui peut absorber de très grandes quantités d'exsudat. En même temps, il protège les bords sensibles de la plaie et la peau environnante contre la macération. Il contient des particules superabsorbantes qui emprisonnent l'exsudat et créent ainsi un environnement humide optimal pour une cicatrisation plus rapide.*

En cas de plaies infectées, Biatain® Superabsorbant peut être utilisé sous la surveillance d'un professionnel de santé.

Biatain® Superabsorber réduit l'activité des protéases Métalloprotéinase matricielle² et Métalloprotéinase matricielle⁹ dans la plaie, contribuant ainsi au processus de cicatrisation.

Caractéristiques



L'exsudat de la plaie joue un rôle essentiel dans le processus de guérison



Une production excessive d'exsudat peut retarder la cicatrisation et entraîner des complications.¹

Avantages du produit

- › Capacité d'absorption et de rétention efficace, même sous compression
- › Fixe les bactéries, les germes et les Métalloprotéinase matricielle
- › Protège les berges de la plaie et la peau environnante contre la macération
- › Facile à appliquer** et conçu pour être retiré sans laisser de traces
- › Peut rester sur la plaie jusqu'à 7 jours
- › Peut être utilisé à la discrétion du médecin chez les patients souffrant d'une infection locale ou systémique
- › Contact doux pour la peau fragile, ne contient pas d'adhésif
- › Confort élevé grâce à sa souplesse
- › Utilisable comme pansement primaire et secondaire



Grâce à sa souplesse, Biatain® Superabsorber est particulièrement facile à appliquer et doux pour la peau.²

¹ World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Consensus Document. Wound exudate: effective assessment and management Wounds International, 2019.

² Wounds UK Best Practice Statement. Effective exudate management. London: Wounds UK, 2013.

³ Based on in vitro data, Coloplast data on file 2025

* Par rapport à la cicatrisation traditionnelle/sèche

** Coloplast Data-on-File 2023 basé sur des tests standardisés

Biatain® Super

Pour les plaies très exsudatives

Indication

Le pansement hydrocapillaire Biatain® Super convient pour les plaies moyennement à fortement exsudatives comme par exemple :

- › Ulcères de jambe
- › Escarres


Les pansements peuvent être utilisés durant toute la durée du processus de cicatrisation, pour la protection des :

- › Brûlures du 2ème degré
- › Plaies chroniques
- › Dermabrasions

Biatain® Super Non Adhésif convient pour tous les types de peau ; Biatain® Super Adhésif est conçu pour une peau périlésionnelle intacte.

Avantages

- › Avec des éléments super absorbants
- › Excellente rétention
- › Manipulation simple

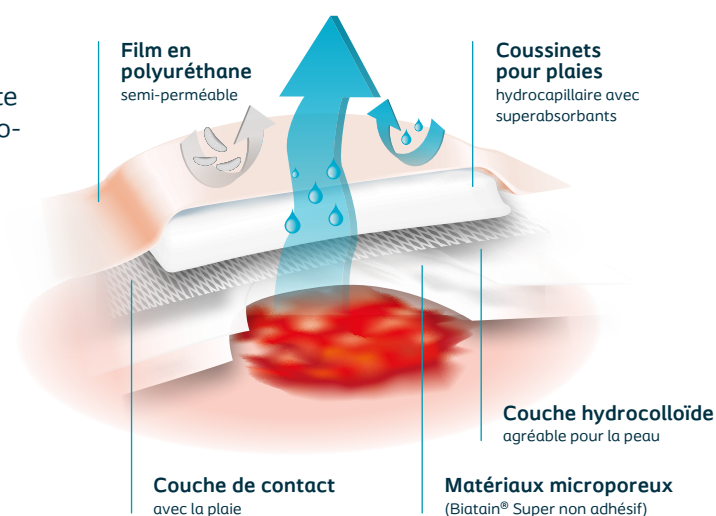


Courte description

Biatain® Super est un pansement hydrocapillaire avec des particules super absorbantes, conçu spécialement pour le traitement des plaies très exsudatives. Le film externe en polyuréthane semi transparent et semi perméable permet à l'excès d'exsudat de s'évaporer vers l'extérieur et protège la plaie contre les germes et l'humidité de l'extérieur.

Une couche de contact avec la plaie, évite l'adhérence du pansement à la plaie.

Biatain® Super Adhésif dispose de bords adhésifs hydrocolloïdes bien tolérés par la peau, alors que la variante non adhésive dispose d'une protection cutanée microporeuse.


Caractéristiques

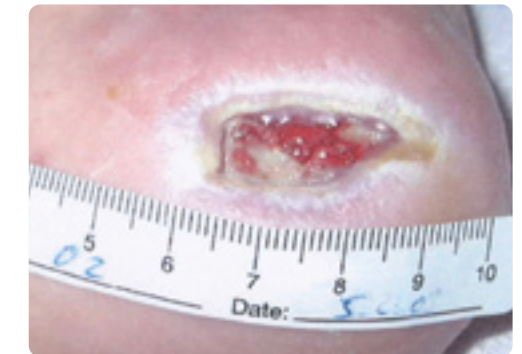

Situation initiale : escarre de degré II, taille env. 2 x 1 cm, macération de la peau périlésionnelle.



Après 2 semaines : réduction de la taille de la plaie, tissu de granulation sain, pas de macération.

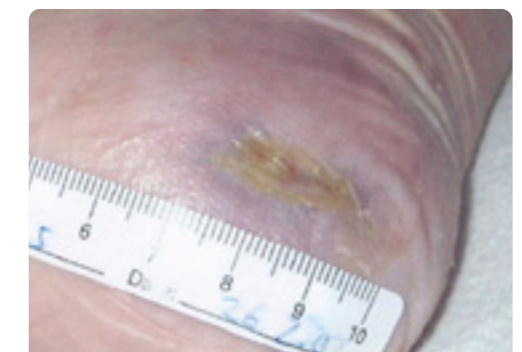

Après 4 semaines : escarre presque cicatrisée, peau périlésionnelle saine.

Avantages du produit

- › Bonne propriété d'absorption et de rétention
- › Capacité d'absorption élevée
- › Crée un milieu humide optimal pour la plaie
- › Protège les nouveaux tissus sans adhérer à la plaie
- › Utilisation économique grâce à une longue durée de port
- › Permet au patient de prendre une douche

Biatain® Fiber

Plus qu'un simple pansement en fibres


Indication

Biatain® Fiber est un pansement en fibres gélifiantes pour le traitement des plaies chroniques et aiguës, y compris les cavités, moyennement à fortement exsudatives, telles que :

- › Ulcères du pied diabétique
- › Ulcères de jambe (d'origine artérielle, veineuse et mixte)
- › Escarres (degré II à IV)
- › Absorption d'exsudat pour plaies oncologiques
- › Plaies traumatiques
- › Brûlures de 2ème degré
- › Sites donneurs de greffe
- › Plaies post-opératoires

Avantages

- › Retient l'exsudat et les bactéries
- › Rétrécissement minimal
- › Forme un gel stable

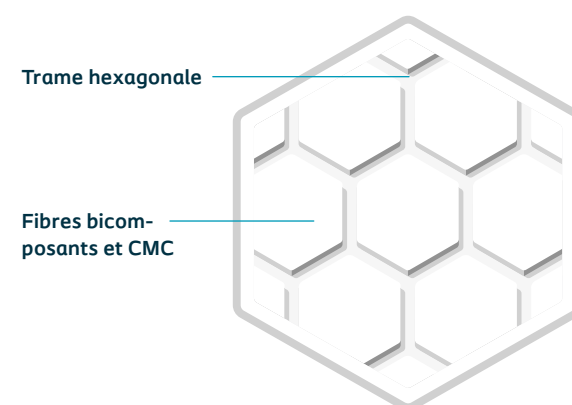

Caractéristiques




Courte description

Biatain® Fiber est un pansement en fibres gélifiantes composé par de la carboxyméthylcellulose (CMC) et des fibres bicomposants. Le pansement est additionnellement renforcé par la trame hexagonale fixée par thermocollage. Ceci est appelé Technologie HexaLock®.

Lorsque les fibres CMC entrent en contact avec l'exsudat, elles l'absorbent et forment un gel stable. Le pansement gélifié retient l'exsudat et s'adapte au lit de la plaie, créant un environnement humide pour la cicatrisation de la plaie. Cet environnement soutient le processus de cicatrisation de la plaie et facilite l'élimination du tissu mort (débridement autolytique).



Biatain® Fiber protège les bords de la plaie grâce à l'absorption verticale.

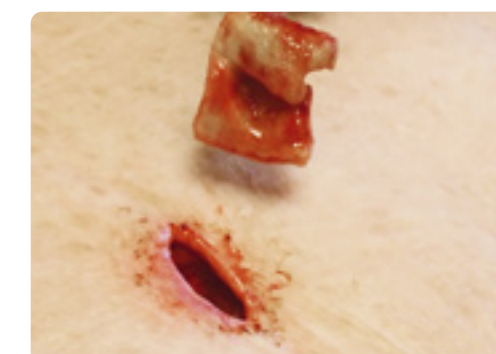

Biatain® Fiber peut être retiré de manière simple en une pièce.

Avantages du produit

- › Grande capacité d'absorption
- › Rétention fiable de l'exsudat et des bactéries
- › Rétrécissement minimal réduisant le risque de formation d'espaces vides et d'accumulation de l'exsudat
- › Retrait facile en une seule pièce grâce à la stabilité du gel
- › Risque minimal de laisser des résidus de gel dans la plaie
- › Absorbe verticalement, protégeant les bords de la plaie contre les dommages causés par l'humidité
- › Élimine les dépôts et favorise un débridement autolytique



Utilisation de Biatain® Fiber pour traiter une plaie profonde et sous-minée.



Biatain® Alginate

Pour les plaies de moyennement profondes à profondes ou cavitaires


Indication

Biatain® Alginate est principalement utilisé pour le nettoyage de la plaie ou pour son remplissage en cas des plaies moyennement à fortement exsudatives comme par exemple :

- › Ulcères de jambe
- › Escarres
- › Ulcères du pied diabétique
- › Brûlures du 1er et 2ème degré

Avantages

- › Effet nettoyant
- › Retrait en une seule pièce
- › Absorption locale
- › Drainage des exsudats vers le pansement secondaire

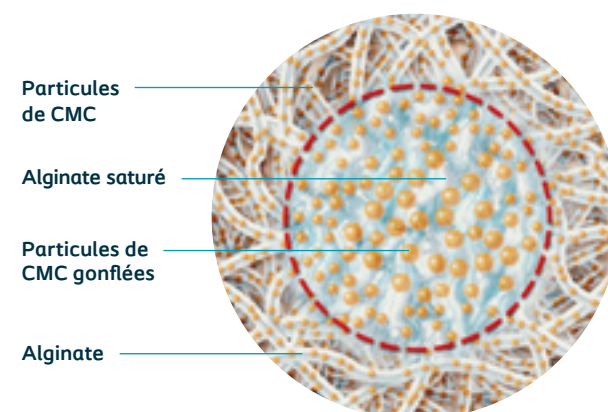

Courte description


Biatain® Alginate se compose à 85 % d'alginate de calcium et à 15 % de particules de carboxyméthylcellulose (CMC) hydrocolloïde.

En raison de l'échange d'ions, la structure réticulée forme, selon l'exsudat absorbé, un gel cohésif qui maintient la plaie dans un milieu humide et absorbe les sécrétions de la plaie ainsi que les résidus tissulaires et les retient en toute sécurité.

Caractéristiques



Plaie post-opératoire, cicatrisant par deuxième intention.

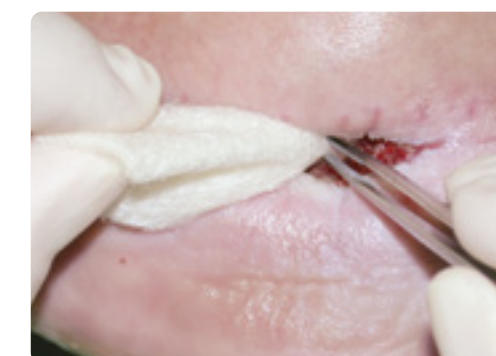

Application de Biatain® Alginate dans la plaie.



Sur la mèche Biatain® Alginate, il ne faudrait appliquer qu'un pansement secondaire approprié.

Avantages du produit

- › Détersion naturelle
- › Absorption locale et rapide et bonne capacité de rétention, pour réduire le risque de macération
- › Capacité d'absorption accrue grâce à la combinaison d'alginate de calcium et de particules de CMC, pour une plus longue durée de port et moins de changements de pansement
- › Favorise la cicatrisation grâce au milieu humide idéal
- › La combinaison des matériaux souples et faciles à appliquer s'adapte de manière optimale aux contours de la plaie
- › Peut être retiré facilement en une seule pièce, de manière atraumatique et sans laisser de résidus dans la plaie
- › Effet hémostatique grâce aux ions de calcium

Biatain® Alginate Ag

Pour plaies couvertes, infectées localement et cavités

Indication


Biatain® Alginate Ag convient pour le soin des plaies moyennement à fortement exsudatives comme par exemple :

- › Ulcères de jambe
- › Escarres
- › Ulcères du pied diabétique
- › Plaies post-opératoires
- › Plaies traumatiques
- › Sites donneurs de greffe
- › Plaies cavitaires
- › Brûlures superficielles et à profondeur moyenne

Biatain® Alginate Ag peut être employé, sous surveillance et selon l'avis du médecin traitant, pour traiter les plaies infectées au niveau local ou les plaies présentant un risque d'infection accru.

Avantages

- › Détersion naturelle
- › Retrait en une seule pièce
- › Effet antimicrobien

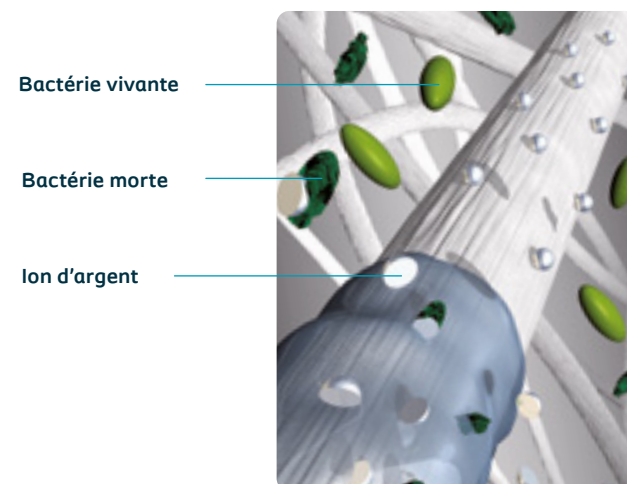

Courte description

Biatain® Alginate Ag est un pansement antimicrobien doté d'une capacité d'absorption élevée composé d'alginate de calcium, de carboxyméthylcellulose (CMC) et 0,5 % d'argent ionique.


Le gel cohésif qui se forme lors de l'absorption de l'exsudat, maintient la plaie en milieu humide et retient de manière sûre les sécrétions de la plaie, les bactéries mortes et les débris tissulaires.

En outre, en fonction de la quantité d'exsudat absorbée, des ions d'argent sont libérés (hydroactivation). Une action antimicrobienne se produit dans le gel en formation et dans le lit de la plaie.

Caractéristiques



Application de Biatain® Alginate Ag au début du traitement.

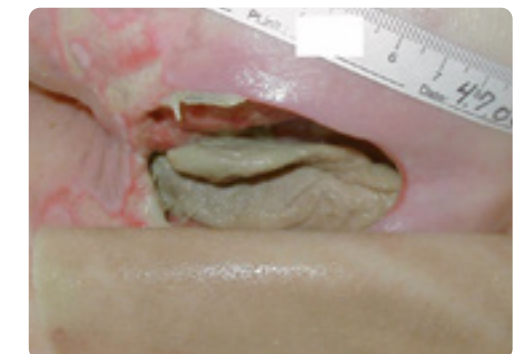

Lors du changement de pansement suivant, Biatain® Alginate Ag est complètement gélifié.



La plaie après la détersion, le 18ème jour de traitement.

Avantages du produit

- › Absorption locale et rapide et bonne capacité de rétention, pour réduire le risque de macération
- › La combinaison des matériaux augmente la capacité d'absorption et permet une plus longue durée de port ainsi que moins de changements de pansement
- › Favorise la cicatrisation grâce au milieu humide idéal ; détersion naturelle et réduction de la charge bactérienne
- › La combinaison des matériaux souples et faciles à appliquer s'adapte de manière optimale aux contours de la plaie
- › Effet antimicrobien contre les bactéries superficielles et tissulaires communes des plaies chroniques. Efficace également contre Candida albicans, MRSA et VRE
- › Le gel cohésif permet le retrait simple et atraumatique en une seule pièce

Biatain® Contact

Un meilleur contact pour une cicatrisation sans obstacle

Indication

Biatain® Contact est une interface avec un côté en silicone, conçu pour le traitement des plaies chroniques et aiguës telles que :

- › Ulcère de jambe
- › Ulcère du pied diabétique
- › Écorchures
- › Plaies postopératoires

en association avec un pansement secondaire.


Il peut également être utilisé pour protéger les plaies non exsudatives et la peau fragile.

Avantages

- › Transfert optimal de l'exsudat
- › Évaluation facilitée de la plaie grâce à sa grande transparence
- › Utilisation facile

Grands pores

Adhérence
d'un seul côté

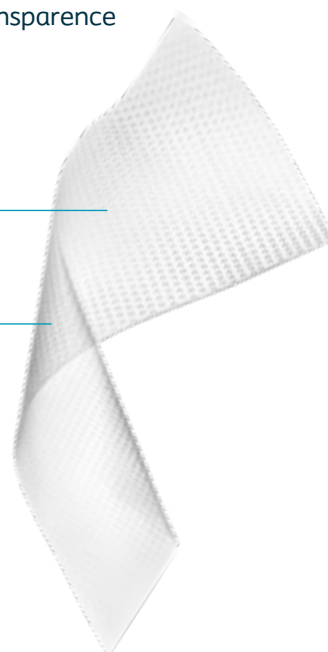

Caractéristiques




Courte description

Biatain® Contact est une interface en silicone qui protège le lit de la plaie et son environnement, favorisant la cicatrisation de la plaie.

Il est formé d'un film de polyuréthane mince et flexible recouvert de silicone d'un côté. Ceci facilite sa manipulation c.-à-d. l'application et le changement du pansement secondaire. Le silicone évite de coller et réduit la douleur lors du changement de pansement.

Les grands pores de la trame perforée permettent un passage sans entrave de l'exsudat dans le pansement secondaire. Grâce au matériel transparent, la plaie peut être examinée sans devoir changer le pansement.

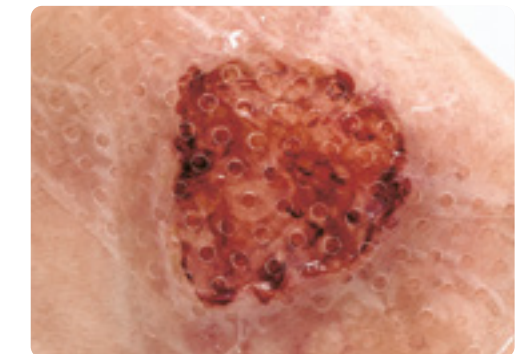

Transparent afin de permettre un contrôle de la plaie sans devoir changer le pansement.



Biatain® Contact protège le tissu de granulation fragile.

Avantages du produit

- › Les grands pores permettent un transfert rapide et optimal de l'exsudat dans le pansement secondaire
- › Pas de fuite latérale de l'exsudat en dessous de Biatain® Contact, ce qui réduit le risque de macération.
- › Transparent pour un contrôle facile de la plaie sans devoir changer le pansement
- › Adhérence d'un côté pour en simplifier l'application et faciliter le changement du pansement secondaire
- › Moins de douleur et aucun dommage du tissu de granulation lors du changement de pansement, grâce à l'adhérence douce en silicone
- › Protège le lit de la plaie, la peau péri-lésionnelle et assure une cicatrisation de la plaie sans obstacle
- › Pas de croissance interne de tissu



Biatain® Contact peut être utilisé même pour les cas d'écorchures ou de lésions douloureuses superficielles.



InterDry®

Le traitement efficace des plis cutanés

Indication

InterDry® est conçu pour protéger la peau des dommages cutanés survenant dans les plis cutanés et/ou dans d'autres régions du corps, où il se produit un frottement peau-contre-peau.

Il est indiqué pour une utilisation entre deux surfaces de peau, où la transpiration et le frottement causent, ou peuvent causer, une inflammation et/ou une irritation. Les symptômes sont également appelés intertrigo.

Avantages

- › Transporte l'humidité hors du pli cutané
- › Minimise le frottement peau-contre-peau
- › Agit contre les champignons et les bactéries avec un complexe antimicrobien à l'argent

Tissu évacuant l'humidité

Complexe d'argent antimicrobien



Courte description

InterDry® est un tissu souple non stérile qui évacue l'humidité, doté d'un complexe d'argent antimicrobien ciblant les trois facteurs de risque associés aux dommages des plis cutanés : humidité, frottement ainsi que bactéries et champignons.

Le tissu en polyester souple transporte l'humidité hors du pli cutané où elle peut s'évaporer. Grâce à une technologie unique brevetée, InterDry® réduit le frottement peau-contre-peau.

En outre, InterDry® contient un complexe d'argent antimicrobien qui agit contre un large éventail de champignons et bactéries couramment présents dans les plis cutanés, durant toute la durée de port pouvant aller jusqu'à 5 jours.



InterDry® devrait dépasser du pli cutané d'au moins 5 cm afin de permettre l'évaporation de l'humidité.

Avantages du produit

- › Réduit les symptômes cliniquement prouvés de l'intertrigo en quelques jours
- › La réduction rapide des symptômes améliore la qualité de vie des patients tout en réduisant le coût du traitement
- › Le matériau souple et flexible assure un confort de port élevé
- › Facile à manipuler et à utiliser
- › Peut être coupé à la taille requise pour l'adapter au pli cutané affecté



Avant d'utiliser InterDry® :
érythème, douleur, démangeaisons, odeur



Après avoir utilisé InterDry® :
cicatrisation presque complète après 7 jours



Allrinse®

La solution pour nettoyer efficacement les plaies

Indication

La solution de rinçage des plaies Allrinse® nettoie et hydrate les plaies aiguës et chroniques, comme par exemple

- › les éraflures, les gerçures, les coupures
- › les brûlures du 1er et du 2e degré
- › les ulcères veineux
- › les ulcères du pied diabétique
- › les escarres de décubitus

Aide à décoller et à déloger les pansements adhérents lors du changement de ceux-ci.

Allrinse® peut également être utilisé dans la région de la bouche et des muqueuses.

Avantages

- › Nettoyage efficace de la plaie
- › Favorise la cicatrisation des plaies
- › Réduit le risque d'infection




Courte description

Allrinse® est une solution sans alcool pour le nettoyage efficace, la décontamination et l'hydratation des plaies chronique et aiguës.


Une combinaison de différents agents tensioactifs substances (tensioactifs) en concentration efficace permet d'obtenir un effet nettoyant particulièrement efficace. Le PHMB dans le milieu acide de la solution réduit la charge bactérienne (par ex. SARM). Le pH acide de la solution, stabilisé par un complexe de zinc et de fer, permet de surmonter la phase de stagnation chronique et favorise la guérison.

Caractéristiques

- Durabilité:** 3 ans après la production
- Phase humide:** 10 – 15 minutes
- Délai d'utilisation:** 3 mois après l'ouverture

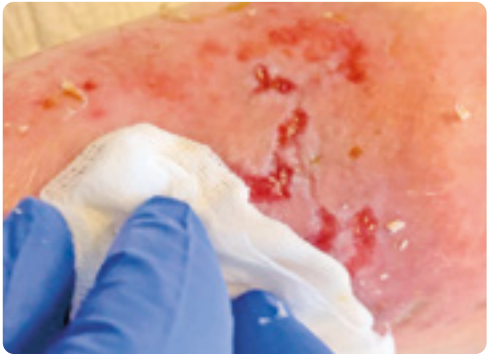

Nettoyage efficace des dépôts avec Allrinse®.

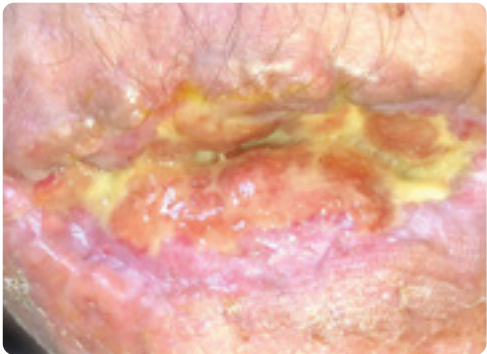

Avant – La plaie est fibrineuse. Le nettoyage de la plaie est effectué avec Allrinse®.



Après – Nous pouvons voir que les dépôts de fibrine ont pu être éliminés.

Avantages du produit

- › Nettoyage physique indolore des plaies de plaies aiguës et chroniques
- › Surmonter la phase de stagnation en optimisant le milieu de la plaie
- › Décontamination efficace des plaies colonisées et contaminées (par ex. SARM) ainsi que prévention des infections
- › Détruit le biofilm
- › Dissout les croûtes et aide au retrait des pansements adhérents
- › Longue durée de conservation après l'ouverture (3 mois)
- › Facile à utiliser
- › Favorise la cicatrisation des plaies
- › Peut être utiliser en combinaison avec les produits usuels du commerce du traitement des plaies (par ex. Biatain® Silicone)



Purilon®

Pour un débridement autolytique en douceur

Courte description

Purilon® Gel est un hydrogel transparent et consistant, contenant de l'alginate. Grâce à sa teneur en eau de 95%, il permet une réhydratation rapide ainsi que le ramollissement des tissus secs. Les nécroses et les dépôts sont éliminés en douceur (débridement autolytique), sans léser les tissus sensibles néoformés.

Indication

Purilon® Hydrogel est principalement indiqué pour les plaies nécrotiques, couvertes et sèches, qui cicatrisent de deuxième intention, comme par exemple :

- › Ulcères de jambe
- › Escarres
- › Brûlures du 1er et 2ème degré

Avantages du produit

- › Sans conservateurs, il est donc encore plus doux et hypoallergique
- › Permet le débridement en douceur
- › La combinaison de la CMC et d'alginate augmente la capacité d'absorption du gel
- › La grande stabilité du gel simplifie l'application et le positionnement du pansement secondaire
- › Le gel ne liquéfie pas et protège les bords.


Pour les plaies infectées, il peut être utilisé sous la surveillance du médecin. Purilon® Gel a toujours besoin d'un pansement secondaire*.

*Par exemple Comfeel® Plus ou un pansement mousse Biatain®



Toujours prêt. En toute sécurité.


Nos représentants de la **sécurité des plaies**

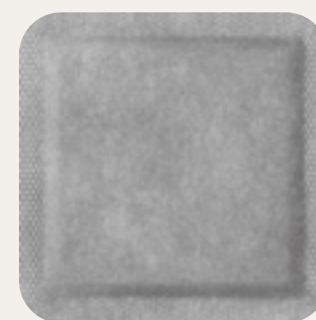

Biatain® Superabsorber



Biatain® Silicone

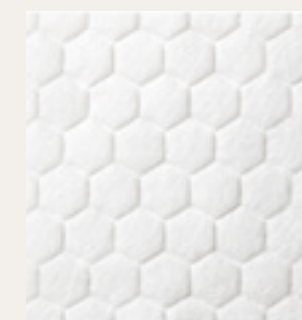

Biatain® Fiber



Allrinse®



Biatain® Silicone Non-Border, avec adhésif en silicone



Référence	Taille/cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
390201	5 × 7,5	10	7766826	35.05.03.01.1
390211	7,5 × 7,5	10	7766827	35.05.03.02.1
390221	10 × 10	10	7766828	35.05.03.03.1
390231	12,5 × 12,5	10	7766829	35.05.03.03.1
390242	10 × 20	5	7766830	35.05.03.04.1
390252	15 × 15	5	7766831	35.05.03.04.1
390262	20 × 20	5	7766832	35.05.03.06.1

Biatain® Silicone Lite, avec bord adhésif



Référence	Taille/cm	Partie absorbante/cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
334520	5 × 5	2,2 × 2,2	5	6444784	35.05.03.01.1
334530	5 × 12,5	2,2 × 9,7	5	6444790	35.05.03.02.1
334443	7,5 × 7,5	4,5 × 4,5	10	5535987	35.05.03.02.1
334453	10 × 10	6,5 × 6,5	10	5535970	35.05.03.03.1
334463	12,5 × 12,5	8,5 × 8,5	10	5535993	35.05.03.03.1

Biatain® Silicone, avec bord adhésif



Référence	Taille/cm	Partie absorbante/cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
334343	7,5 × 7,5	4,5 × 4,5	10	4671582	35.05.03.02.1
334353	10 × 10	6,5 × 6,5	10	4684538	35.05.03.03.1
334000	10 × 20	5,5 × 15,5	5	6662860	35.05.03.04.1
334010	10 × 30	5,5 × 25,5	5	6662877	35.05.03.06.1
334080	14 × 19,5	7,5 × 12,1 Multiforme	5	6662920	35.05.03.10.1
334363	12,5 × 12,5	8,5 × 8,5	10	4671599	35.05.03.03.1
334373	15 × 15	10,5 × 10,5	5	5776030	35.05.03.04.1
334383	17,5 × 17,5	13 × 13	5	5941894	35.05.03.05.1

Biatain® Silicone, avec bord adhésif, Sacrum/Talon



Référence	Taille/cm	Partie absorbante/cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
334040	15 × 19	10,9 × 14 Sacrum	5	6662883	35.05.03.10.1
334050	25 × 25	17 × 17,2 Sacrum	5	6662908	35.05.03.10.1
334060	18 × 18	14 × 13,2 Talon	5	6662914	35.05.03.11.1

Biatain® Adhésif



Référence	Taille/cm	Partie absorbante/cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
334200	12,5 × 12,5	8 × 8	10	5397539	35.05.03.03.1
334230	18 × 18	13 × 13	5	5397545	35.05.03.05.1

Biatain® Sacrum/Talon Adhésif



Référence	Taille/cm	Partie absorbante/cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
334830	17 × 17	8 × 9 Sacrum	5	5397551	35.05.03.10.1
334850	23 × 23	10 × 11 Sacrum	5	5397568	35.05.03.10.1
334880	19 × 20	6 × 6 Talon	5	5397574	35.05.03.11.1

Biatain® Non adhésif



Référence	Taille/cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
361050	5 × 7	10	5395084	35.05.03.01.1
334100	10 × 10	10	5395090	35.05.03.03.1
334120	10 × 20	5	5395115	35.05.03.04.1
334130	15 × 15	5	5395109	35.05.03.04.1
334160	20 × 20	5	5395121	35.05.03.06.1

Pansement mousse avec ions argent



Biatain® Silicone Ag, avec bord adhésif



Référence	Taille/cm	Partie absorbante/cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
396363	7,5 × 7,5	4,5 × 4,5	5	5604493	35.06.04.21.1
396373	10 × 10	6,5 × 6,5	5	5604501	35.06.04.22.1
396383	12,5 × 12,5	8,5 × 8,5	5	5604518	35.06.04.23.1
396393	15 × 15	10,5 × 10,5	5	6203856	35.06.04.24.1
396403	17,5 × 17,5	13 × 13	5	6203833	35.06.04.24.1

Biatain® Ag Non adhésif



Référence	Taille/cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
351050	5 × 7	5	5397812	35.06.04.20.1
396220	10 × 10	5	7450893	35.06.04.22.1
396230	10 × 20	5	5397841	35.06.04.23.1
396250	15 × 15	5	7450901	35.06.04.24.1
396260	20 × 20	5	5397858	35.06.04.25.1

Pansement mousse avec Ibuprofène



Biatain® Ibu doux-adhérent



Référence	Taille/cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
341400	10 × 10	5	7450870	—
341420	10 × 20	5	7450887	—

Biatain® Ibu Non adhésif



Référence	Taille/cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
341050	5 × 7	5	5397887	—
341100	10 × 10	5	5397893	—
341120	10 × 20	5	5397901	—
341150	15 × 15	5	5397918	—
341200	20 × 20	5	5397924	—

Hydrocolloïde

Comfeel® Plus Flexibel



Référence	Taille/cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
331100	10 × 10	10	1834718	35.05.02.03.1
331150	15 × 15	5	1834724	35.05.02.04.1
331200	20 × 20	5	1834747	35.05.02.06.1

Comfeel® Plus Contour



Référence	Taille/cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
332800	6 × 8	5	1834753	35.05.02.02.1
332830	9 × 11	5	1834776	35.05.02.03.1

Comfeel® Plus Transparent



Référence	Taille/cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
335300	5 × 7	10	6823470	35.05.02.01.1
335330	10 × 10	10	6823493	35.05.02.03.1
335480	5 × 25	5	6823524	35.05.02.03.1
335360	9 × 14	10	6823487	35.05.02.03.1
335420	15 × 20	5	6823501	35.05.02.05.1
335471	5 × 15	5	6823518	35.05.02.02.1
335370	9 × 25	5	6823530	35.05.02.04.1

Superabsorber

Biatain® Superabsorber non adhésif



Référence	Taille/cm	Partie absorbante/cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
336000	7,5 × 7,5	5,5 × 5,5	10	1122367	35.05.05.02.1
336020	12 × 12	10 × 10	10	1122368	35.05.05.03.1
336040	12 × 22	10 × 20	10	1122369	35.05.05.04.1
336050	15 × 15	13,5 × 13,5	10	1122370	35.05.05.04.1
336070	20 × 25	18 × 23	10	1122371	35.05.05.05.1
336100	25 × 45	23 × 43	10	1122373	35.05.05.08.1

Biatain® Super Adhésif



Référence	Taille/cm	Partie absorbante/cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
046100	10 × 10	5 × 5	10	5394759	35.05.05.03.1
046250	12 × 20	6 × 14	10	5394788	35.05.05.04.1
046150	15 × 15	8 × 8	10	5394765	35.05.05.04.1
046200	20 × 20	11 × 11	10	5394771	35.05.05.05.1

Biatain® Super non-adhesive



Référence	Taille/cm	Partie absorbante/cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
046300	10 × 10	5 × 5	10	5394794	35.05.05.03.1
046350	15 × 15	8 × 8	10	5394802	35.05.05.04.1

Pansement en fibres gélifiantes

Biatain® Fiber



Référence	Taille/cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
335010	5 × 5	10	7749047	35.05.07.01.1
335030	10 × 10	10	7749048	35.05.07.02.1
335060	15 × 15	10	7749049	35.05.07.04.1
335070	19 × 25	10	7749050	35.05.07.05.1
335080	2,5 × 46 Mèche	10	7749051	35.05.07.09.1

Alginate/Alginate avec ions argent

Biatain® Alginate



Référence	Taille/cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
037053	5 × 5	10	7795531	35.05.06.01.1
037102	10 × 10	10	7795525	35.05.06.02.1
037152	15 × 15	10	7795526	35.05.06.04.1
037403	3 × 44 Mèche	5	7795527	35.05.06.08.1

Biatain® Alginate Ag



Référence	Taille/cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
037551	5 × 5	10	7795532	35.06.06.20.1
037600	10 × 10	10	7795528	35.06.06.21.1
037650	15 × 15	10	7795529	35.06.06.23.1
037800	3 × 44 Mèche	10	7795530	35.06.06.26.1

Interface en silicone

Biatain® Contact, interface en silicone



Référence	Taille/cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
335601	5 × 7,5	5	7741250	35.05.08.01.1
335611	7,5 × 10	5	7741251	35.05.08.02.1
335621	10 × 18	5	7741252	35.05.08.03.1
335630	15 × 25	5	7741253	35.05.08.04.1
335640	18 × 30	5	7741254	35.05.08.05.1

Solution de rinçage des plaies

Allrinse® Solution de rinçage des plaies



Référence	Contenu	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
220P4795	Spray de 500ml	1	1110080	99.12.04.00.1
220P4798	Bouteille de 500 ml	1	1118725	99.12.04.00.1

Tissu pour le traitement des plis cutanés

InterDry®, avec un complexe d'argent



Référence	Taille/cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
679180	25 × 366 Rouleau	1	7674316	—
679190	25 × 91	10	7674322	—

Hydrogel et protection de la peau

Purilon® Gel



Référence	Contenu	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
039060	8 g	10	2175695	35.05.09.01.1
039000	15 g	10	1915919	35.05.09.02.1
039030	25 g	10	1915948	35.05.09.03.1

Crème protectrice



Référence	Contenu	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
047200	Tube de 60 ml	1	1046889	—

Lotion nettoyante



Référence	Contenu	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
047100	Flacon de 180 ml	1	1946937	—
047150	Lingettes	30	1424104	—

IV je nach Sekundärverband

Recommandation sans obligation. Toute responsabilité est exclue.



Thérapie locale des plaies

Volume d'exsudat très fort ●●●●



Objectif du traitement

Gestion de l'exsudat
Milieu humide optimal pour les plaies



Réduction des germes
Thérapie de fixation et de réduction des germes, Solution de rinçage des plaies

Nettoyage



En plus, en cas de plaies très occupées : **Biatain® Fiber**



+ Pansement secondaire

Recommandation de produit

Plaies superficielles

Biatain® Superabsorber



Si nécessaire, procéder à des changements de pansements supplémentaires avec nettoyage de la plaie. Peut également être utilisé en cas d'infection locale ou systémique, selon l'appréciation du médecin.

Plaies profondes et complexes

Biatain® Fiber



Biatain® Superabsorber



Volume d'exsudat moyen - fort ●●●○ – ●●●○



Objectif du traitement

Gestion de l'exsudat
Milieu humide optimal pour les plaies



Réduction des germes
Solution de rinçage des plaies



Reconstitution des tissus
Tranquillité des plaies

Nettoyage



En plus, pour les plaies très occupées : **Biatain® Fiber** ou **Biatain® Alginate****



+ Pansement secondaire

Profondeur de la plaie 0 – 2 cm

Biatain® Silicone ou **Biatain® Silicone Non-Border**



Biatain® Non adhésif



Biatain® Contact*
Schützt die Wunde und fördert eine ungestörte Wundheilung.



Profondeur de la plaie > 2 cm


Biatain® Fiber ou **Biatain® Alginate****



Biatain® Silicone ou **Biatain® Silicone Non-Border** ou **Biatain® Non adhésif**



Volume d'exsudat léger - moyen ●●○○○ – ●●○○○

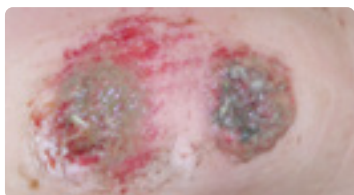

Objectif du traitement

Exsudat-management
Optimal feuchtes Wundmilieu



Épithélialisation
Tranquillité de la plaie / protection des tissus

Nettoyage

Biatain® Fiber combiné avec **Allrinse®** Solution de rinçage des plaies



Plaies superficielles

Biatain® Silicone Lite



Biatain® Contact*



Comfeel® Plus ou **Comfeel® Plus Transparent**



Pour en savoir plus

L'expertise clinique pour les médecins et les professionnelles en soins

Concernant l'expertise clinique, nous vous avons préparé sur notre page internet, des données scientifiques indépendantes. Vous y trouverez des informations concernant les essais cliniques, des études de cas ainsi que des études de base en laboratoire.

Vous pouvez télécharger certaines données. En cas de questions, nos experts se tiennent à votre entière disposition.



www.coloplastprofessional.ch/fr-ch/

Pour les plaies infectées, nous recommandons Biatain® Silicone Ag, Biatain® Ag ou Biatain® Alginate Ag

* Pansement secondaire nécessaire en fonction de la quantité d'exsudat

** Remplir les plaies profondes avec le pansement Biatain® Alginate sans trop serrer, en veillant à ce que le pansement ne dépasse pas les bords de la plaie.

Coloplast développe des produits et des services qui facilitent la vie des personnes ayant des besoins médicaux très personnels. En étroite collaboration avec les professionnels et les utilisateurs, nous trouvons ensemble de nouvelles voies pour améliorer les soins.

Nous commercialisons des produits de haute qualité pour le traitement des stomies, de la continence et des plaies, ainsi que pour les soins de la peau, l'urologie et les soins de laryngectomie et de trachéotomie. En outre, nous proposons également des services de soins à domicile en Allemagne.

Nous sommes une entreprise internationale qui emploie plus de 16 500 personnes, possède des filiales dans 40 pays et aide des personnes dans plus de 140 pays grâce à nos produits.