

La mèche Biatain Alginate peut être retirée facilement en l'humidifiant avec du sérum physiologique stérile. Retirer avec une pince sans provoquer de douleur ou de traumatisme au tissu néoformé.

Description du produit

Les produits Biatain Alginate sont absorbants, stériles, non tissés, constitués de fibres de carboxyméthylcellulose (CMC) à haute teneur en alginate de calcium G (acide guluronique). Ils sont conçus pour être absorbants, se gélifier rapidement et permettre un retrait d'un seul tenant.

À mesure que l'exsudat de la plaie est absorbé, l'alginate forme un gel qui aide à la détersion autolytique, tout en maintenant un environnement humide pour une cicatrisation optimale de la plaie.

Biatain Alginate est fabriqué sans latex de caoutchouc naturel.

Indication

Le pansement Biatain Alginate est indiqué pour les plaies chroniques et aiguës modérément à fortement exsudatives suivantes : escarres, ulcères de jambe artério-veineux, ulcères du pied diabétique, plaies cavitaires, lacerations, dermabrasions, sites de greffe et donneurs de greffe, plaies post-opératoires, brûlures superficielles et du second degré.

Les pansements Biatain Alginate peuvent aussi être utilisés pour contrôler des saignements mineurs sur des plaies superficielles.

Les pansements Biatain Alginate peuvent être utilisés sous compression.

Contre-indications

Ne pas utiliser sur des patients présentant une sensibilité connue aux alginates ou à la carboxyméthylcellulose.

Implantation chirurgicale.

Ne pas utiliser pour contrôler un saignement abondant.

Précautions

Ne pas réutiliser en totalité ou en partie, sous risque de compromettre la stérilité et/ou les performances du pansement.

Ne doit pas être ingéré et doit être conservé hors d'atteinte des enfants et des animaux.

À utiliser sous la supervision d'un professionnel de santé.

Ne pas utiliser sur des plaies sèches ou légèrement exsudatives.

Mode d'emploi

Préparation du site

- Déterger si nécessaire et irriguer la plaie conformément aux protocoles standards.
- Sécher l'excès de solution présente sur la peau périlésionnelle.

Choix du pansement

- Sélectionner une taille de Biatain Alginate légèrement supérieure à celle de la plaie.

Application du produit

- Couper (à l'aide de ciseaux stériles) ou plier le pansement pour l'ajuster à la plaie. Jeter l'excédent de pansement en raison du risque de contamination.
- Pour les plaies cavitaires, combler sans tasser, en veillant à ce que le pansement ne chevauche pas les berges de la plaie.
- Recouvrir et maintenir le pansement à l'aide d'un pansement secondaire non occlusif ou semi-occlusif, par exemple les pansements hydrocolloïdes Comfeel Plus ou les pansements hydrocellulaires Biatain.

Changement et retrait

- Biatain Alginate peut être laissé en place jusqu'à 7 jours. La fréquence de changement du pansement dépendra de l'état de la plaie et du niveau d'exsudat.
- Renouveler Biatain Alginate à saturation du pansement secondaire ou dès que les bonnes pratiques de soins des plaies imposent le changement du pansement.
- Retirer délicatement le pansement secondaire.
- Si la plaie semble sèche, saturer le pansement de sérum physiologique stérile avant de le retirer.



Distribué par :

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
Danemark

Mode d'emploi

23323765 Version 2

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S. Tous droits réservés. © 2020-11-16


58/3/E4 - 75/2/A3

Illustrations

Comment utiliser le pansement Biatain Alginate




Biatain Alginate peut être coupé à l'aide d'une paire de ciseaux stériles pour l'ajuster à la plaie. Jeter l'excédent de pansement en raison du risque de contamination.

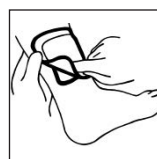


Application du pansement secondaire :
Biatain Alginate doit être recouvert d'un pansement secondaire, par exemple, un pansement Biatain ou un pansement Comfeel Plus, selon l'état clinique de la plaie. Biatain Alginate peut être retiré facilement en l'humidifiant avec du sérum physiologique stérile. Retirer avec une pince sans provoquer de douleur ou de traumatisme au tissu néoformé.


Comment utiliser la mèche Biatain Alginate

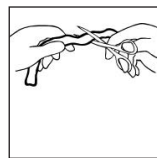

La mèche Biatain Alginate peut être coupée à l'aide d'une paire de ciseaux stériles pour l'ajuster aux plaies étroites ou de petites tailles. Jeter l'excédent de mèche en raison du risque de contamination.

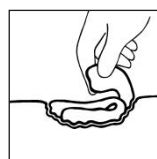

La mèche Biatain Alginate doit être appliquée de manière homogène dans la plaie et sans être tassée. Cela permet aux fibres d'alginate de former un gel humide et de se conformer à la taille de la cavité.

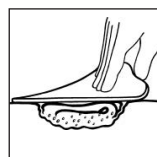

Application du pansement secondaire :
La mèche Biatain Alginate doit être recouverte d'un pansement de couverture secondaire, par exemple, un pansement Biatain ou un pansement Comfeel Plus, selon l'état clinique de la plaie.

- Retirer délicatement le pansement du lit de la plaie et éliminez le conformément aux procédures et directives locales.
- Nettoyer la plaie conformément aux protocoles standards avant d'appliquer un nouveau pansement.

Symboles

	Conserver à une température contrôlée ne dépassant pas 25 °C/77 °F
	Garder à l'abri de la lumière.
	Conserver au sec
	Stérilisé par irradiation (R).
	Ne pas réutiliser
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
	Ne pas restériliser
	Consulter la notice d'utilisation
	Avertissement
	Date de péremption
	Numéro de lot
	Référence catalogue
	Fabricant
	Mandataire établi dans l'Union européenne
	Indiqué pour les plaies modérément à fortement exsudatives