

Explication étape par étape : le nouveau Peristeen® Light

Le système d'irrigation facile à utiliser et discret avec une faible quantité d'eau pour un quotidien sans souci



Peristeen® Light en détail

Peristeen® Light est un système d'irrigation à base d'eau, facile à utiliser et discret, avec un faible volume d'eau (175 ml/250 ml). Il permet de soulager les troubles intestinaux chroniques tels que la constipation ou l'incontinence fécale et peut être intégré en quelques étapes simples dans votre vie quotidienne.

1. Sonde conique à usage unique avec deux ouvertures pour l'eau et une pointe arrondie pour une introduction la plus douce possible.
2. Base de la sonde spacieuse : elle garantit que le réservoir d'eau n'entre pas en contact avec les excréments.
3. Une valve unidirectionnelle empêche le reflux des excréments dans le réservoir d'eau.
4. Le couvercle s'ouvre facilement et dépasse légèrement au-dessus du bord du réservoir d'eau de sorte que l'eau résiduelle peut être facilement se vider.
5. Manipulation en toute sécurité : Le réservoir d'eau est facile à manipuler dans toutes les positions. Il a une capacité de 175 ml ou 250 ml d'eau et ne contient pas de caoutchouc naturel. Le récipient peut être employé pour 30 utilisations, puis il est peut être remplacé.
6. Peristeen® Light avec un réservoir d'eau de 250 ml est disponible avec un tuyau de rallonge*.

* disponible uniquement en Suisse



Comment utiliser Peristeen® Light

Avant de commencer

Veillez vider votre vessie avant d'utiliser Peristeen® Light.

Étape 1: Remplir le réservoir d'eau et fixer la sonde conique

Ouvrez le couvercle et remplissez le récipient à ras bord avec de l'eau du robinet ou d'une bouteille. Elle doit être à la température du corps (34-40 degrés). Une eau trop chaude peut endommager la paroi intestinale sensible. Si l'eau est trop froide, des crampes peuvent survenir.

Fermez le couvercle. Retirez la sonde conique de son emballage et fixez-la au couvercle.

Si vous utilisez un tube* pour la prolonger, fixez une extrémité au couvercle et l'autre au récipient.



Étape 2: Activer le revêtement de la sonde et éliminer l'air

Passer la sonde sous l'eau courante pendant au moins 2 secondes afin d'activer le revêtement hydrophile. Comprimez ensuite lentement le réservoir d'eau jusqu'à ce que l'eau s'échappe de l'extrémité de la sonde afin d'éliminer l'air de la sonde ou du tube. Commencez alors l'application dans les 2 minutes.



Remarque : n'utilisez pas d'autres lubrifiants pour la sonde.

Étape 3: Introduire la sonde, rincer et vider l'intestin

Prenez le réservoir d'eau dans une main et insérez doucement la sonde dans le rectum jusqu'à ce que la base de la sonde touche votre corps. Comprimez lentement le réservoir d'eau pour faire passer l'eau dans le rectum et commencer l'irrigation. Retirez ensuite la sonde. Les selles et l'eau sont évacuées dans les toilettes.



Étape 4: Démonter le produit

Pour détacher la sonde du réservoir d'eau ou du tuyau*, tenez-la par exemple avec du papier toilette et retirez-la délicatement du couvercle ou du tuyau*. Vous pouvez ensuite jeter la sonde avec les déchets ménagers.



Étape 5: Vider le réservoir d'eau et le sécher

Videz l'eau qui reste dans le récipient. Nettoyez les surfaces extérieures du récipient avec de l'eau et du savon doux.

Séchez ensuite le récipient, par exemple avec une serviette, et stockez-le avec le couvercle ouvert. Le tube* doit être suspendu pour sécher.



* disponible uniquement en Suisse

Vous avez encore des questions ?

Ce guide étape par étape vous aidera à utiliser le nouveau système Peristeen® Light.

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi du système Peristeen® Light ci-joint. Il contient des informations importantes sur les domaines d'application du système, les contre-indications éventuelles et les précautions à prendre.



Scanner le code QR :
Cliquez ici pour visionner la
vidéo d'utilisation de Peristeen®
Light.



En savoir plus sur l'utilisation
de Peristeen® Light avec tube
da rallonge*.



* disponible uniquement en Suisse



Veuillez toujours lire le mode d'emploi ci-joint avant d'utiliser le produit.

AT: PM-36277 / 210NIP369Z CH: PM-36278 / 220NCMS444D

Coloplast AG, Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz, Schweiz, Tel. +41 799 79 79, swissinfo@coloplast.com, www.coloplast.ch

Coloplast GmbH, Thomas-Kleist-Platz 10, 1030 Wien, Österreich, Tel. +43 1 7075751-0, atbestellung@coloplast.com, www.coloplast.at

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2025-02. All rights reserved Coloplast A/S